

TEST GRIPPE - Influenza A/B antigen

Dépistage des Virus Influenza A et B dans les sécrétions nasales

nouveau

**écouvillons floqués et
contrôles externes fournis**

- **simple**

test unitaire immuno-chromatographique sur membrane en une étape. Lecture visuelle. Détection individualisée Influenza A et B.

- **rapide**

résultat en 15 minutes

- **fiable**

Augmentation de la sensibilité globale, par l'utilisation d'un **ÉCOUVILLON FLOQUÉ** Copan (relargage maximal de l'échantillon)

Sensibilité relative (vs RT-PCR)

Flu A: 99,0 % Flu B: 97,7 %

Spécificité relative (vs RT-PCR)

Flu A: 98,9 % Flu B: 99,0 %

- **coffret complet**

contenant les **écouvillons floqués**, la solution d'extraction, les tubes d'extraction+ **bouchons compte-gouttes**, un portoir à tubes, les tests immunochromatographiques, et les **écouvillons de contrôle Flu A+/Flu B+/Flu A/B-**

Coffret de 20 tests unitaires

- **péremption longue**


jusqu'à 24 mois à température ambiante

- **tarif très compétitif**



Référence produit: 014L470

Code NABM 4241, B40

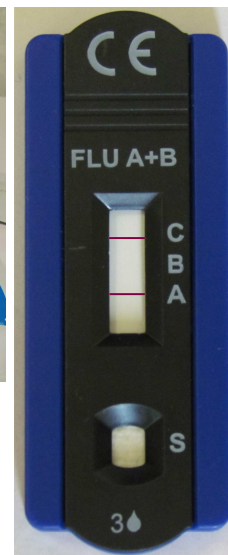

test positif en FLU A

MANIPULATION TRÈS SIMPLE:

- 1) Insérer (environ 5 à 8 cm) délicatement l'écouvillon stérile dans la narine contenant le plus de sécrétion. Tourner délicatement l'écouvillon sur la cloison nasale plusieurs fois.
- 2) Mettre **10 gouttes de tampon d'extraction** dans le tube fourni. Placer l'écouvillon floqué dans le tube et le remuer vigoureusement pendant 10 secondes. Presser l'écouvillon contre la paroi du tube pour en extraire le maximum de solution. Éliminer l'écouvillon. **Boucher le tube à l'aide du bouchon compte-gouttes** fourni.
- 3) Ouvrir une pochette, sortir le dispositif de test et le poser sur une surface plane. Déposer **3 gouttes** de solution d'extraction dans le puits S du dispositif. Laisser migrer la solution le long de la membrane du test.
- 4) Lire le résultat à **15 minutes**. Ne pas dépasser 20 minutes.
Un test positif pour FLU A ou FLU B se traduit par l'apparition d'une bande rose-mauve au niveau des repères A ou B du dispositif, accompagnée d'une bande de contrôle C rose-mauve.
Un test négatif ne comporte que la bande contrôle C.

Distribution exclusive en France:

BIOLYS SAS

Parc de la Ronze 69440 Taluyers
Tél: 04 78 48 26 80 Fax: 04 78 48 24 30
www.biolys.net contact@biolys.net



Fabriqué par ULTIMED (Allemagne)