

SYPHILIS TEST

Test immuno-chromatographique rapide de nouvelle génération - Recherche des anticorps spécifiques IgG et IgM anti Treponema pallidum



∞ Utilisation

Sur sang total, sérum ou plasma

∞ Performances (vs TPHA)

très sensible: 99,7%

très spécifique: 99,6%

Utilise la combinaisons de 2 antigènes spécifiques

Test validé par l'AFSSAPS en 2007

∞ Manipulation simple et rapide

test savonnette « propre »

résultat en 10 minutes

∞ Péremption longue

>18 mois à température ambiante

Fabriqué par Ultimeid (Allemagne)

Référence produit: 004C054

Coffret complet pour 20 tests

MODE OPÉRATOIRE:

- 1) Sur SÉRUM ou PLASMA:
à l'aide la pipette fournie déposer **3 gouttes** de sérum ou plasma (75 µl) dans le puits « S ».
- 2) Sur SANG TOTAL
A l'aide la pipette fournie déposer **2 gouttes** de sang total (50 µl) dans le puits « S », puis une goutte de tampon de dilution fourni..
- 3) Lire le **résultat** après **10 minutes** (sans dépasser 30 minutes).

Un test **positif** se traduit par l'apparition d'une bande test « T », accompagnée d'une bande de contrôle « C » .

Un test négatif ne comporte que la bande contrôle « C » .



Résultat négatif



Résultat positif

Distribution exclusive en France:



200 rue Léon Blum
69100VILLEURBANNE
Tel : 04.78.48.26.80
contact@biolys.net



WWW.BIOLYS.NET